



Franca G.

SARL Les ATELIERS de FRANCA  
50 route de Colmar  
68040 INGERSHEIM - FRANCE  
[franca@franca-g.fr](mailto:franca@franca-g.fr)  
[christelle@franca-g.fr](mailto:christelle@franca-g.fr)

NOTICE EXPLICATIVE

## 1. LE CADRE

Dans le contexte de crise sanitaire majeure associée à une pénurie de masques, nos masques proposés sont une alternative à l'absence de masques ou à un masque confectionné par soi-même non conforme.

Les masques les plus efficaces sont les FFP2 et FFP3. Ces masques sont réservés aux professionnels de santé en contact avec des patients COVID-19.

Le masque est destiné à éviter, lors de l'expiration de celui qui le porte, la projection de sécrétions des voies aériennes ou de salive pouvant contenir des agents infectieux transmissibles par voie « gouttelettes » ou « aérienne ».

Pour ne pas exposer les autres professionnels au virus, les masques en tissu restent une alternative acceptable en terme de prévention et uniquement à titre de prévention.

**Ce masque est une première barrière dit de sécurité.**

Nos masques ne prétendent pas se substituer aux masques normalisés (FFP1, FFP2, IR, IIR) et ne sont pas encore homologués (en cours de demande d'homologation) mais ils sont conformes aux recommandations du CHU de Grenoble.

Le gouvernement a fait un appel national pour solliciter toutes les entreprises de textiles et de la conception pour réaliser ces masques.

**Ce masque est réutilisable et réalisé dans le Haut-Rhin. Il contribue à une utilisation éthique et responsable (contrairement au jetable).**

## 2. QUI PEUT UTILISER CES MASQUES DE PRÉVENTION

Ces masques seront à destination de toute personne entrant en contact avec du public et ayant besoin d'une protection à titre préventif pour se protéger des gouttelettes de salive dues aux postillons ou aux éternuements.

Par exemple, les commerçants de bouche, des agents de l'administration, des forces de l'ordre, des transporteurs, des banques, des employés du BTP, de La Poste, des pharmaciens, des aides à domicile qui ne sont pas en contact direct avec les patients Covid-19 ....ou des particuliers.

## 3. OBJECTIFS DE CES MASQUES

Ce masque est une première barrière dit de sécurité.

Ce masque aide à éviter la propagation de salive et n'est pas une protection suffisante contre les malades atteints du virus. C'est pourquoi, nous vous rappelons également qu'il ne faut pas se toucher le visage ni le masque lui-même, se laver les mains et appliquer tous les gestes barrière recommandés par les services de santé.

## 4. OBJECTIFS DE CETTE NOTICE

Informez les utilisateurs au bon usage de ces masques de prévention.

Nous recommandons une utilisation stricte des consignes énoncées ci-dessous, car le risque est que les professionnels hors santé n'aient pas l'habitude d'utiliser des masques et ne maîtrisent pas forcément les règles d'hygiène adéquate.

## 5. COMPOSITION et ENTRETIEN DES MASQUES

### Composition :

Masque fabriqué en tissu technique composé de 3 couches toutes lavables à 90 ° degré.

- 1 couche de coton
- 1 couche ouatine coton
- 1 couche polyester/coton pour la résistance

Entretien : Lavable de 60° à 90° degré en machine ou dans une casserole (cf page 5)

## 6. UTILISATION DES MASQUES

- Avant la première utilisation, laver les masques selon les indications ci-dessous.
- Avant de mettre le masque lavé, se laver les mains à l'eau et au savon pendant 30 secondes et bien sécher les mains avec une serviette propre ou à l'air libre et/ou utiliser du gel hydroalcoolique.
- Mettre le masque en le saisissant par sa partie centrale externe et en tenant l'élastique.
- Le masque doit être porté en couvrant le nez, le menton et la bouche. Il doit être appliqué hermétiquement sur le visage.
- Une fois ajusté, ne plus toucher le masque avec les mains.
- Se laver les mains fréquemment ou utiliser du gel hydroalcoolique, car le professionnel risque de toucher le masque pendant qu'il travaille.
- Le masque est manipulé seulement pour la pose et le retrait (ne pas le repositionner), et toujours par les attaches.
- **Changer le masque tous les 3 heures. Veiller que cette consigne soit respectée.**
- A l'issue des 3 heures, le masque aura fait son travail et le tissu aura des bactéries, il ne faut surtout pas le toucher.
- Après usage, retirer le masque en saisissant par l'arrière les lanières ou par les élastiques sans toucher la partie avant du masque.
- Mettre les masques souillés dans une boîte hermétique ou sachet et fermer jusqu'au lavage.
- Se laver les mains au savon ou/et avec du gel hydroalcoolique après retrait.
- Récupérer les masques et les laver. Soit en machine à laver de 60 à 90 degrés avec du détergent classique ou faire bouillir le linge (cf page 5). Porter des gants ou bien se laver les mains après la manipulation.
- Faire très bien sécher les masques à l'air libre ou au sèche-linge. Attention l'humidité participe à la prolifération des bactéries.
- Les stocker hermétiquement.
- Distribuer avec des mains propres ou avec le port de gant.

Les masques ont un usage limité. Tout masque qui semble abîmé ou présentant un défaut, doit être jeté. La durée de vie des masques est estimée à au moins 10 lavages (= au minimum 10 utilisations).

Les précautions et les instructions mentionnées ne peuvent pas couvrir toutes les conditions et situations possibles.

## 7. RESPONSABILITÉS

Nous sommes tous acteurs des règles d'hygiène et de sécurité et l'utilisateur doit bien comprendre que le bon sens et l'attention et le respect des règles sont des facteurs indispensables pour une bonne utilisation du masque et son efficacité.

Nous préconisons de nommer un responsable qui veillera à la bonne utilisation de ces masques. C'est la clé de la réussite.

En aucun cas la société « les Ateliers de Franca » ne pourra pas être tenue responsable de toute mauvaise utilisation des masques ou du non-respect des règles précédemment édictées.

Nous rendons aussi attentif aux incidences psychologiques qui s'installent dans la durée. Le masque a un effet psychologique qui rassure.

## 8. DISTRIBUTION

La demande de masques est considérable, même à titre préventif. Je vous invite à faire vos demandes et nous organiserons une distribution cas par cas en fonction des restrictions de déplacements.

Pour toute commande ou renseignements, appeler MOEGLEN Christelle au 06 03 61 36 97 ou par mail [christelle@franca-g.fr](mailto:christelle@franca-g.fr)

## 9. PRIX

Le financement des masques permettra de financer une partie de la main d'œuvre et une partie des fournitures. Les Ateliers de Franca distribuent aussi à titre de Solidarité.

Le masque lavable est vendu à l'unité 6,5 € TTC pour un uni et 7 € TTC pour un imprimé coloré. Pour les entreprises à partir de 50 masques, il est vendu 5 € HT et à partir de 150 masques, le prix est à 4,5 HT.

Une cagnotte est mise en place à titre de solidarité pour les professionnels exposés.

## 10. CONTACTS

Nous sommes à votre disposition pour toutes questions et informations.

La situation est exceptionnelle et nous sommes tous dans l'apprentissage de la gestion de cette crise. Cette notice peut être évolutive en fonction des informations que nous disposons.

Nous sommes en veille et en contact avec l'ensemble des professionnels.

Pour toutes questions techniques, appeler ou faire un sms à GRILLO Franca au 06 26 70 16 46  
Pour toute commande ou renseignements, appeler MOEGLEN Christelle au 06 03 61 36 97 ou par mail [christelle@franca-g.fr](mailto:christelle@franca-g.fr).

MERCI

L'équipe des Ateliers de Franca

• Comment faire bouillir les masques (si vous n'utilisez pas de machine à laver) :

1. Remplissez une grande casserole remplie entre moitié et trois-quarts avec de l'eau. Faites chauffer l'eau.
2. Ajoutez 3 cuillères à soupe de bicarbonate de soude par litre d'eau que vous avez dans la casserole. Mélangez le sodium avec une grande cuillère en métal. Remuez régulièrement jusqu'à ce que le sodium se dissout dans l'eau.
3. Une fois que le contenu de la casserole bout, mettez les masques à tremper dans la casserole. Il est important qu'elle ne soit pas pleine à ras bord car les masques doivent avoir de place pour bouger et remuer facilement.
4. Laissez vos masques bouillir à pendant 30 minutes. Retirez ensuite la casserole du feu et laissez tremper vos vêtements dans la casserole jusqu'à ce que l'eau soit froide.
5. Retirez ensuite les masques et les faire sécher.

Photo du masque porté :

